

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
D020040	MICRO CISEAUX VANNAS L:85MM DROIT MODIFIE TUBINGEN	3661219340188
	VANNAS MICRO SCISSORS L:85MM STRAIGHT, TUBINGEN MODIFIED	 3 661219 340188

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

10-004

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

X - Microchirurgie
X - Microsurgery
X - Microcirugía

L A N D A N G E R

Microchirurgie ciseaux - Microsurgery scissors - Microcirugía tijeras

VANNAS

Pointu - Sharp - Aguda

Droit
Straight
Recta



D020010
8,5 cm - 3 1/2"

Courbe
Curved
Curva



D020020
8,5 cm - 3 1/2"

Coudé vers le haut
Angled up
Accodades hacia arriba



D020035
8,5 cm - 3 1/2"

VANNAS modifié TUBINGEN

Droit
Straight
Recta



D020040
8,5 cm - 3 1/2"

Courbe
Curved
Curva



D020045
8,5 cm - 3 1/2"

Coudé vers le haut
Angled up
Accodades hacia arriba



D020055
8,5 cm - 3 1/2"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

X - 4

 1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
D020040	MICRO CISEAUX VANNAS L:85MM DROIT MODIFIE TUBINGEN	3661219340188
	VANNAS MICRO SCISSORS L:85MM STRAIGHT, TUBINGEN MODIFIED	 3 661219 340188

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X46Cr13(1.4034)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Landanger 2015

10-004

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).