

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                         | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D037010   | MICRO CISEAUX DROITS LAMES 5MM LU 75MM DE BELLUCCI  | 3661219340621                                                                                          |
|           | BELLUCCI MICRO SCISSORS WL 75MM BLADES 5MM STRAIGHT | <br>3 661219 340621 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

12-033

# **DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION**

L A N D A N G E R

O.R.L. micro instruments - E.N.T. micro instruments - O.R.L. micro instrumentos

8 cm - 3 1/4"



Micro-pince  
Micro-forceps  
Micro-pinzas

D036010

1,6 x 7,0 mm D036010

0,7 x 3,5 mm D036020

0,8 x 4,0 mm D036030

0,6 x 4,0 mm D036040

0,4 x 4,0 mm D036050

8 cm - 3 1/4"



BELLUCI

Micro-ciseaux  
Micro-scissors  
Micro-tijeras

D037010

Droit  
Straight  
Recta  
4,0 mm D037010

Droit  
Straight  
Recta  
5,5 mm D037020

Coudé haut  
Angled upward  
Angulada arriba  
5,5 mm D037030

Courbe à gauche  
Curved left  
Curva izquierda  
5,5 mm D037040

Courbe à droite  
Curved right  
Curva derecha  
5,5 mm D037050

XII - O.R.L.  
XII - E.N.T.  
XII - O.R.L.

XII - 33

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2022  
1/1

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                  | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D037010   | MICRO CISEAUX DROITS LAMES 5MM LU 75MM DE BELLUCCI  | 3661219340621                                                                                          |
|           | BELLUCCI MICRO SCISSORS WL 75MM BLADES 5MM STRAIGHT | <br>3 661219 340621 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021) + X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

12-033

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*