

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC12340-18	MICRO PINCE DISSECTION L:180MM MANCHE ROND MODELE FORT DOUBLE GUIDE MORS 0,8X6MM AVEC PLATEFORME 250GR	3661219263654
	MICRO DISSECTING FORCEPS L:180MM ROUND HANDLE HEAVY STYLE JAWS 0,8X6MM W/ PLATEFORM DIAMONITE TI 250GR	 3 661219 263654

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-015

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Tying Micro Tissue Forceps / *Micro Pinces à Dissection* / Micro Pinzas de disección

With Platform - Heavy Model - 250 g Pressure
Avec Plateforme - Modèle Fort - Pression 250 g
 Con Plataforma - Modelo Fuerte - Presión 250 g

0.4 x 6 mm





DC12330-18

L : 180 mm - 7"

DC12330-21

L : 210 mm - 8"






0.8 x 6 mm



DC12340-18

L : 180 mm - 7"

DC12340-21

L : 210 mm - 8"






 Add TI for Titanium Model / *Ajoutez TI pour le Modèle Titane* / Añadir TI para Modelo Titano

15

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC12340-18	MICRO PINCE DISSECTION L:180MM MANCHE ROND MODELE FORT DOUBLE GUIDE MORS 0,8X6MM AVEC PLATEFORME 250GR	3661219263654
	MICRO DISSECTING FORCEPS L:180MM ROUND HANDLE HEAVY STYLE JAWS 0,8X6MM W/ PLATEFORM DIAMONITE TI 250GR	 3 661219 263654

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

01-015

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).