

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC12900-18	MICRO PINCE L:180MM MANCHE ROND DIA 8MM BOUT ANNEAU 1MM DIAMONITE 180GR	3661219263708
	MICRO TISSUE FORCEPS L:180MM ROUND HANDLE DIA 8MM RING TIP 1MM DIAMONITE 180GR	 3 661219 263708

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-007

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION


Diamonite


Tying Micro Tissue Forceps / Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas de disección
Ring Tip - 180 g Pressure
Extrémité Anneau - Pression 180 g
Extremidad Anillo - Presión 180 g

1 - Dissection

Ø 1 mm



DC12900-12

L : 120 mm - 4 3/4"

DC12900-15

L : 150 mm - 6"

DC12900-18

L : 180 mm - 7"

DC12900-21

L : 210 mm - 8"



Ø 2 mm



DC12905-12

L : 120 mm - 4 3/4"

DC12905-15

L : 150 mm - 6"

DC12905-18

L : 180 mm - 7"

DC12905-21

L : 210 mm - 8"

 1/1

 Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

7

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC12900-18	MICRO PINCE L:180MM MANCHE ROND DIA 8MM BOUT ANNEAU 1MM DIAMONITE 180GR	3661219263708
	MICRO TISSUE FORCEPS L:180MM ROUND HANDLE DIA 8MM RING TIP 1MM DIAMONITE 180GR	 3 661219 263708

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

01-007

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*