

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC13101-20	PINCE ATRAUMA DE BAKEY L:200MM MORS 1MM 200GR	3661219263975
	DE BAKEY ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:200MM JAWS:1 MM 200GR	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-024

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION


1 - Dissection



DeBakey Atrauma Tissue Forceps / Pinces DeBakey Atraumatiques / Pinzas DeBakey Atraumáticas

200g Pressure
Pression 200 g
Presión 200 g

DeBakey

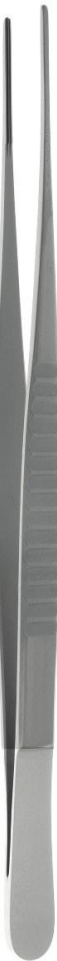

Copyright LANDANGER 2009 - 2020

1 mm



- DC13101-12
L : 120 mm - 4 3/4"
- DC13101-16
L : 160 mm - 6"
- DC13101-20 
L : 200 mm - 8"
- DC13101-24
L : 240 mm - 9 1/2"
- DC13101-30
L : 300 mm - 12"

1.5 mm



- DC13100-16 
L : 160 mm - 6"
-  DC13100-20 
L : 200 mm - 8"
- DC13100-24 
L : 240 mm - 9 1/2"
- DC13100-30
L : 300 mm - 12"

2 mm



- DC13200-16 
L : 160 mm - 6"
- DC13200-20 
L : 200 mm - 8"
- DC13200-24 
L : 240 mm - 9 1/2"
- DC13200-30
L : 300 mm - 12"

2.8 mm



- DC13300-16 
L : 160 mm - 6"
- DC13300-20 
L : 200 mm - 8"
- DC13300-24 
L : 240 mm - 9 1/2"
- DC13300-30
L : 300 mm - 12"

3.5 mm



- DC13400-16
L : 160 mm - 6"
- DC13400-20
L : 200 mm - 8"
- DC13400-24
L : 240 mm - 9 1/2"
- DC13400-30
L : 300 mm - 12"

 Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titánico

24

 1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC13101-20	PINCE ATRAUMA DE BAKEY L:200MM MORS 1MM 200GR	3661219263975
	DE BAKEY ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:200MM JAWS:1 MM 200GR	 3 661219 263975

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X12Cr13(1.4006)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

01-024

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).