

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC15420-18	PINCE POUR AIGUILLES CHITWOOD-DEBAKEY MANCHES ROUNDS L:180MM I:1,3MM TUNGSTENE 200GR	3661219394440
	CHITWOOD-DEBAKEY NEEDLE PULLING FORCEPS ROUND HANDLE L:180MM W:1,3MM TC 200GR	 3 661219 394440

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

1 - Dissection



Needle Pulling Forceps / Pinces pour Aiguilles / Pinzas para Agujas

Round Handle
Manches Ronds
Mango Redondo

Chitwood-DeBakey





DeBakey



TC Inserts



1 mm



DC15410-15
L : 150 mm - 6"

DC15410-18
L : 180 mm - 7"

DC15410-21
L : 210 mm - 8"

1.3 mm



DC15420-15
L : 150 mm - 6"

DC15420-18
L : 180 mm - 7"

DC15420-21
L : 210 mm - 8"

1.5 mm



DC15430-15
L : 150 mm - 6"

DC15430-18
L : 180 mm - 7"

DC15430-21
L : 210 mm - 8"

32



Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC15420-18	PINCE POUR AIGUILLES CHITWOOD-DEBAKEY MANCHES ROUNDS L:180MM I:1,3MM TUNGSTENE 200GR	3661219394440
	CHITWOOD-DEBAKEY NEEDLE PULLING FORCEPS ROUND HANDLE L:180MM W:1,3MM TC 200GR	 3 661219 394440

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

62466

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Material type :

Nuance matière :

X12Cr13(1.4006) + TUNGSTENE

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Delacroix 2020

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

01-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).