

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC15700-20	PINCE POUR AIGUILLES CHITWOOD-DEBAKEY L:200MM I:3.5MM TUNGSTENE 200GR	3661219161196
	CHITWOOD-DEBAKEY NEEDLE PULLING FORCEPS L:200MM W:3.5MM TC 200GR	 3 661219 161196

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-031

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

 DeBakey
 TC Inserts


 Needle Pulling Forceps / *Pinces pour Aiguilles / Pinzas para Aiguas*
 Flat Handle
Manche Plat
 Mango plano
 Chitwood-DeBakey

1 - Dissection

1.5 mm

DC15400-15
L : 150 mm - 6"

DC15400-20
L : 200 mm - 8"

 DC15400-24
L : 240 mm - 9 1/2"

DC15400-30 
L : 300 mm - 11 3/4"

2 mm

DC15500-15
L : 150 mm - 6"

DC15500-20
L : 200 mm - 8"

DC15500-24
L : 240 mm - 9 1/2"

DC15500-30 
L : 300 mm - 11 3/4"



2.7 mm

DC15600-15
L : 150 mm - 6"

DC15600-20
L : 200 mm - 8"

 DC15600-24
L : 240 mm - 9 1/2"

DC15600-30 
L : 300 mm - 11 3/4"

3.5 mm

DC15700-15
L : 150 mm - 6"

DC15700-20
L : 200 mm - 8"

DC15700-24
L : 240 mm - 9 1/2"

DC15700-30 
L : 300 mm - 11 3/4"



31

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC15700-20	PINCE POUR AIGUILLES CHITWOOD-DEBAKEY L:200MM I:3.5MM TUNGSTENE 200GR	3661219161196
	CHITWOOD-DEBAKEY NEEDLE PULLING FORCEPS L:200MM W:3.5MM TC 200GR	 3 661219 161196

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X12Cr13(1.4006) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

01-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*