

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC20052-12	MICRO CISEAUX JACOBSON LAMES 10MM L:120MM COUDE POINTU FIN 60° MANCHE PLAT	3661219293231
	JACOBSON MICRO SCISSORS L:120MM ANG SHARP FINE 60° FLAT HANDLE BLADE 10MM	

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-008

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

2 - Scissors



Jacobson Micro Scissors / *Micro Ciseaux Jacobson* / Micro Tijeras Jacobson

10 mm Blades - Flat Handle
Lames 10 mm - *Manche Plat*
Lamas 10 mm - Mango Plano

Jacobson



DC20050-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20050-18

L : 180 mm - 7"



DC20050-21

L : 210 mm - 8"



DC20051-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20051-18

L : 180 mm - 7"



DC20051-21

L : 210 mm - 8"



DC20053-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20053-18

L : 180 mm - 7"



DC20053-21

L : 210 mm - 8"



DC20054-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20054-18

L : 180 mm - 7"



DC20054-21

L : 210 mm - 8"



8



Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC20052-12	MICRO CISEAUX JACOBSON LAMES 10MM L:120MM COUDE POINTU FIN 60° MANCHE PLAT	3661219293231
	JACOBSON MICRO SCISSORS L:120MM ANG SHARP FINE 60° FLAT HANDLE BLADE 10MM	 3 661219 293231

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X38CrMoV15(1.4117)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

02-008

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*