

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC20101-22TI	MICRO CISEAUX BAIONNETTE L:225MM COURBE TI	3661219127369
	BAYONET MICRO SCISSORS L:225MM CVD TI	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-023

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Bayonet Micro Scissors / *Micro Ciseaux Baïonnette* / Micro Tijeras Bayoneta

Straight
Droit
Recta



DC20100-19
L: 190 mm - 7 1/2"

 DC20100-22
L: 225 mm - 8 3/4"

DC20100-24
L: 240 mm - 9 1/2"

Curved
Courbe
Curva



DC20101-19
L: 190 mm - 7 1/2"

 DC20101-22
L: 225 mm - 8 3/4"

DC20101-24
L: 240 mm - 9 1/2"



Vannas

Tenotomy
Ténotomie
Tenotomía

Straight
Droit
Recta



DC20102-19
L: 190 mm - 7 1/2"

 DC20102-22
L: 225 mm - 8 3/4"

DC20102-24
L: 240 mm - 9 1/2"

Curved
Courbe
Curva



DC20103-19
L: 190 mm - 7 1/2"

 DC20103-22
L: 225 mm - 8 3/4"

DC20103-24
L: 240 mm - 9 1/2"

 1/1

 : Add TI for Titanium Model / *Ajoutez TI pour le Modèle Titane* / *Añadir TI para Modelo Titanio*

2 - Scissors

23

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC20101-22TI	MICRO CISEAUX BAIONNETTE L:225MM COURBE TI	3661219127369
	BAYONET MICRO SCISSORS L:225MM CVD TI	 3 661219 127369

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

38727

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

TITANE / TITANIUM

Material type :

Nuance matière :

TA6V(TITANE)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Delacroix 2020

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

02-023

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).