

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                  | CODE EAN                                                                            |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DC21103-22 | CISEAUX CARDIOVASC DE BAKEY L:225MM 25°      | 3661219127963                                                                       |
|            | DE BAKEY CARDIOVASCULAR SCISSORS L:225MM 25° |  |

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-024

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

2 - Scissors



DeBakey Scissors / Ciseaux DeBakey / Tijeras DeBakey

Angled - Sharp  
Coudé - Pointu  
Angulada - Aguda  
25°



**DC21100-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21100-17**  
L: 165 mm - 6 1/2"

**DC21103-22** NEW NOUVEAU NUEVO  
L: 225 mm - 8 1/4"

**DC21106-28**  
L: 280 mm - 11"

DeBakey



Angled - Blunt  
Coudé - Mousse  
Angulada - Desafilada  
25°



**DC21103-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21103-17**  
L: 165 mm - 6 1/2"

45°



**DC21101-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21101-17** NEW NOUVEAU NUEVO  
L: 165 mm - 6 1/2"

**DC21104-22** NEW NOUVEAU NUEVO  
L: 220 mm - 8 1/4"

**DC21107-28**  
L: 280 mm - 11"



45°



**DC21104-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21104-17**  
L: 165 mm - 6 1/2"

60°



**DC21102-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21102-17**  
L: 165 mm - 6 1/2"

**DC21105-22** NEW NOUVEAU NUEVO  
L: 220 mm - 8 1/4"

**DC21108-28**  
L: 280 mm - 11"



60°



**DC21105-14**  
L: 140 mm - 5 1/2"

**DC21105-17**  
L: 165 mm - 6 1/2"

24



Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>           | CODE EAN                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC21103-22 | CISEAUX CARDIOVASC DE BAKEY L:225MM 25°      | 3661219127963                                                                                          |
|            | DE BAKEY CARDIOVASCULAR SCISSORS L:225MM 25° | <br>3 661219 127963 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X38CrMoV15(1.4117)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Delacroix 2020

02-024

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*