

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC21170-18	CISEAUX CARDIOVASC DIETHRICH-POTTS L:180MM 25°	3661219128199
	DIETHRICH-POTTS CARDIOVASCULAR SCISSORS L:180MM 25°	 3 661219 128199

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-029

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION


Diethrich-Potts Scissors / Ciseaux Diethrich-Potts / Tijeras Diethrich-Potts

Diethrich-Potts

25°



DC21170-14
L : 140 mm - 5 1/2"

DC21170-18
L : 180 mm - 7"

90°



DC21173-14
L : 140 mm - 5 1/2"

DC21173-18
L : 180 mm - 7"

45°



DC21171-14
L : 140 mm - 5 1/2"

DC21171-18
L : 180 mm - 7"

125°



DC21174-14
L : 140 mm - 5 1/2"


DC21174-18
L : 180 mm - 7"

60°



DC21172-14
L : 140 mm - 5 1/2"

DC21172-18
L : 180 mm - 7"

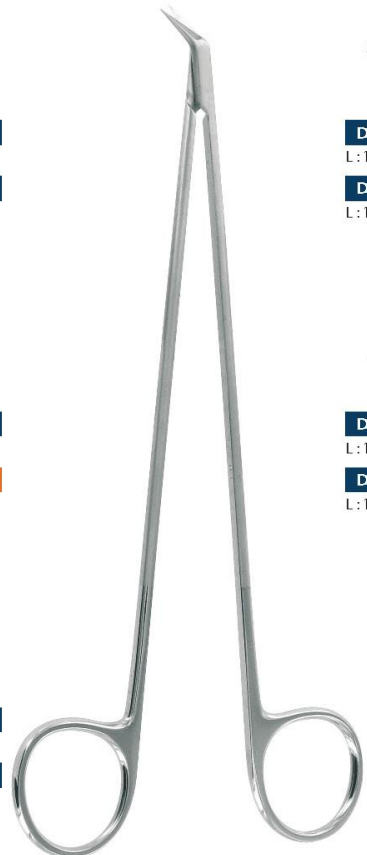

 1/1

2 - Scissors

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC21170-18	CISEAUX CARDIOVASC DIETHRICH-POTTS L:180MM 25°	3661219128199
	DIETHRICH-POTTS CARDIOVASCULAR SCISSORS L:180MM 25°	 3 661219 128199

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

38727

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X38CrMoV15(1.4117)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Delacroix 2020

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

02-029

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).

LANDANGER SA – Rue Renée et Louis Landanger - Z.I. La Vendue - CS 52152 - 52906 CHAUMONT Cedex 9

Téléphone / Phone +33 (0)3 25 02 10 10 Télécopie / Fax +33 (0)3 25 02 10 20