

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC21230-17	CISEAUX CARDIOVASC MERVEILLEUX L:170MM COURBE MOUSSE	3661219128472
	MERVEILLEUX CARDIOVASCULAR SCISSORS L:170MM CVD BLUNT	 3 661219 128472

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

2 - Scissors



Scissors / Ciseaux / Tijeras

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
 Angulada - Aguda



45°

DC21233-17
 L : 170 mm - 6 1/2"

Fine - Sharp
Fin - Pointu
 Fina - Aguda



DC21235-14
 L : 140 mm - 5 1/2"

DC21235-17
 L : 170 mm - 6 1/2"

Angled - Blunt
Coudé - Mousse
 Angulada - Desafilada



DC21232-14
 L : 140 mm - 5 1/2"

DC21232-17
 L : 170 mm - 6 1/2"

Curved - Blunt
Courbe - Mousse
 Curva - Desafilada



DC21230-14
 L : 140 mm - 5 1/2"

 **DC21230-17**
 L : 170 mm - 6 1/2"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
 Curva - Aguda



DC21231-14
 L : 140 mm - 5 1/2"

DC21231-17
 L : 170 mm - 6 1/2"

Straight - Sharp
Droit - Pointu
 Recta - Aguda



DC21234-14
 L : 140 mm - 5 1/2"

DC21234-17
 L : 170 mm - 6 1/2"



32

 1/1

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC21230-17	CISEAUX CARDIOVASC MERVEILLEUX L:170MM COURBE MOUSSE	3661219128472
	MERVEILLEUX CARDIOVASCULAR SCISSORS L:170MM CVD BLUNT	 3 661219 128472

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X38CrMoV15(1.4117)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

02-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).