

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC21231-14	CISEAUX CARDIOVASCULAIRE MERVEILLEUX L:140MM COURBE POINTU	3661219293682
	MERVEILLEUX CARDIOVASCULAR SCISSORS L:140MM CVD SHARP	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

02-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

2 - Scissors



Scissors / Ciseaux / Tijeras

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda



45°

DC21233-17
L: 170 mm - 6 1/2"

Curved - Blunt
Courbe - Mousse
Curva - Desafilada



DC21230-14
L: 140 mm - 5 1/2"

 **DC21230-17**
L: 170 mm - 6 1/2"

Fine - Sharp
Fin - Pointu
Fina - Aguda



DC21235-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC21235-17
L: 170 mm - 6 1/2"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda



DC21231-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC21231-17
L: 170 mm - 6 1/2"

Angled - Blunt
Coudé - Mousse
Angulada - Desafilada



DC21232-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC21232-17
L: 170 mm - 6 1/2"

Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Aguda



DC21234-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC21234-17
L: 170 mm - 6 1/2"



32

 1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC21231-14	CISEAUX CARDIOVASCULAIRE MERVEILLEUX L:140MM COURBE POINTU	3661219293682
	MERVEILLEUX CARDIOVASCULAR SCISSORS L:140MM CVD SHARP	 3 661219 293682

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

38727

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X38CrMoV15(1.4117)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Delacroix 2020

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

02-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).