

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC30230-28	CROCHET IMA (COUETIL) MOUSSE L:28MM	3661219202653
	IMA (COUETIL) BLUNT HOOK RETRACTOR L:28MM	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-016

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

3 - Retractors



Couëttil Retractor Accessories / Accessoires pour Écarteur Couëttil / Accesorios para Separador Couëttil




Couëttil

"U" Shape Valve "U"
Válvula "U"

DC30210-20
a : 100 mm - b : 20 mm

DC30211-25
a : 100 mm - b : 25 mm

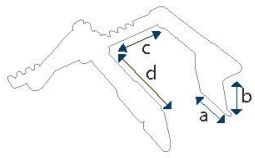

DC30212-20
a : 30 mm - b : 20 mm



"U" Shape Valve "U"
Válvula "U"



Sharp Pointu
Agudo

DC30219-23
L : 23 mm - W : 20 mm

DC30220-28
L : 28 mm - W : 20 mm


DC30221-32
L : 32 mm - W : 20 mm



DC30222-38
L : 38 mm - W : 20 mm

DC30223-43
L : 43 mm - W : 20 mm

DC30224-50
L : 50 mm - W : 20 mm

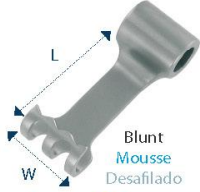

Blunt Mousse
Desafilado

DC30229-23
L : 23 mm - W : 20 mm

DC30230-28
L : 28 mm - W : 20 mm

DC30231-32
L : 32 mm - W : 20 mm




DC30232-38
L : 38 mm - W : 20 mm

DC30233-43
L : 43 mm - W : 20 mm

DC30234-50
L : 50 mm - W : 20 mm

Sterilization Tray - Instruments not included
Panier de Stérilisation - Instruments non inclus
Bandeja de Esterilización - Instrumentos no incluidos

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala

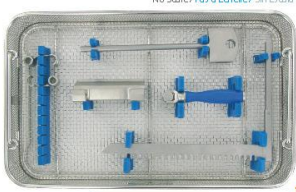

DC30209-00
400 x 245 x 70 mm - 15^{3/4}" x 9^{3/4}" x 2^{3/4}"

NEW MODÈLE NOUVEAU



Adjustable Hook
Crochet Ajustable
Gancho Ajustable

DC30250-00
L : 120 mm

Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30230-28	CROCHET IMA (COUETIL) MOUSSE L:28MM	3661219202653
	IMA (COUETIL) BLUNT HOOK RETRACTOR L:28MM	 3 661219 202653

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi18-9(1.4307)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-016

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*