

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30269-00	PANIER PERFORE POUR ECARTEUR IMA II 400X250X70MM AVEC COUVERCLE ET ACCESSOIRES	3661219450115
	PERFORATED TRAY FOR IMA II RETRACTOR 400X250X70MM WITH LID AND ACCESSORIES	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-017

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Delacroix-Chevalier
Paris

Sternal Retractor / Écarteur Sternal / Separador Esternal

Designed by Pr Couëttil / Développé par le Pr Couëttil / Desarrollado por Pr Couëttil



DC30260-00

a : 98 mm - b : 23 mm - c max : 205 mm - d : 180 mm


Included: Hooks (x2)

Inclus: Crochets (x2)

Incluidos: Ganchos (x2)


Sterilization Tray - Instruments not included
Panier de Stérilisation - Instruments non inclus
Bandeja de Esterilización - Instrumentos no incluidos

No Sale / Pas d'Échelle / Sin Escala

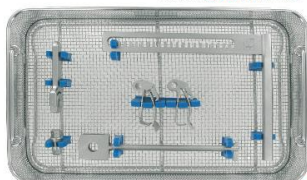

DC30269-00

400x250x70 mm - 15^{3/4} x 10^{3/4} x 2^{3/4}

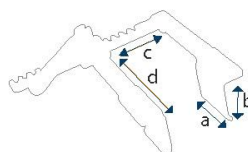NEW
NOUVEAU
NUEVO


17

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30269-00	PANIER PERFORE POUR ECARTEUR IMA II 400X250X70MM AVEC COUVERCLE ET ACCESSOIRES	3661219450115
	PERFORATED TRAY FOR IMA II RETRACTOR 400X250X70MM WITH LID AND ACCESSORIES	 3 661219 450115

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

12143

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + SILICONE / STAINLESS STEEL + SILICONE

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + SILICONE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-017

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).