

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30400-00	ECARTEUR THORACIQUE DUBOST L:155MM I:97MM OUVERTURE MAX:195MM AVEC DC30420-30 (PAIRE) DC30421-40 (PAIRE) DC30422-50 (PAIRE)	3661219129912
	DUBOST THORACIC RETRACTOR L:155MM I:97MM MAX OPENING:195MM INCLUDED DC30420-30 (PAIR) DC30421-40 (PAIR) DC30422-50 (PAIR)	

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-020

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Delacroix-Chevalier
Paris

Dubost Sternal Retractor / *Écarteur Sternal Dubost* / Separador Esternal Dubost

"Original"


Dubost



DC30400-00

a: 97 mm - cmax: 195 mm - d: 160 mm

Included / *Inclus* / *Incluidos*: DC30420-30 (pair / *paire* / *par*) - b: 30 mm
DC30421-40 (pair / *paire* / *par*) - b: 40 mm
DC30422-50 (pair / *paire* / *par*) - b: 50 mm

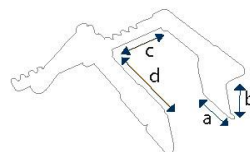

4/5

20

Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30400-00	ECARTEUR THORACIQUE DUBOST L:155MM I:97MM OUVERTURE MAX:195MM AVEC DC30420-30 (PAIRE) DC30421-40 (PAIRE) DC30422-50 (PAIRE)	3661219129912
	DUBOST THORACIC RETRACTOR L:155MM I:97MM MAX OPENING:195MM INCLUDED DC30420-30 (PAIR) DC30421-40 (PAIR) DC30422-50 (PAIR)	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45182

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + SILICONE / STAINLESS STEEL + SILICONE

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + SILICONE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-020

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*