

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30730-30	PAIRE DE VALVES DUBOST I:75MM P:30MM POUR ECARTEUR BYPASS+	3661219156680
	PAIR OF BLADES W:75MM D:30MM FOR BYPASS+ RETRACTOR DUBOST STYLE	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-023

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Bypass + Retractor Accessories / Accessoires pour Écarteur Bypass + / Accesorios para Separador Bypass +



DC30709-23
L : 23 mm - W : 20 mm

DC30710-28
L : 28 mm - W : 20 mm

DC30711-32
L : 32 mm - W : 20 mm

DC30712-38
L : 38 mm - W : 20 mm

DC30714-43
L : 43 mm - W : 20 mm

DC30713-50
L : 50 mm - W : 20 mm



DC30714-00
L : 120 mm
Ajustable atrauma hook
Crochet Ajustable Atraumatique
Gancho Ajustable Atraumático



DC30720-10
a : 30 mm - b : 20 mm

DC30721-20
a : 100 mm - b : 20 mm

DC30722-25
a : 100 mm - b : 25 mm



Unit / Unité / Unidad
DC30740-00
L : 97 mm
Sternal approximator
Approximateur Sternal
Aproximador Esternal




Pair / Paire / Par
DC30731-30
a : 97 mm - b : 30 mm

DC30732-40
a : 97 mm - b : 40 mm

DC30733-50
a : 97 mm - b : 50 mm



Pair / Paire / Par
DC30730-30
a : 75 mm - b : 30 mm

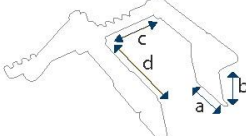

3 - Retractors

23

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30730-30	PAIRE DE VALVES DUBOST I:75MM P:30MM POUR ECARTEUR BYPASS+	3661219156680
	PAIR OF BLADES W:75MM D:30MM FOR BYPASS+ RETRACTOR DUBOST STYLE	 3 661219 156680

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi18-9(1.4307)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-023

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*