

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30734-40	PAIRE DE VALVES DUBOST POUR BANDE SILICONE I:97MM P:40MM POUR ECARTEUR BYPASS+	3661219289746
	PAIR OF DUBOST BLADES FOR BYPASS+ RETRACTOR FOR SILICONE PAD W:97MM D:40MM	

Catalogues / catalogs

Brochure DC Silicone Pads

Chapitre-page

2

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Silicone Pads For Retractor Blades

DC30991-40



Silicone Pad

- ★ Reduction from 10% to 30% of the peak effort inflicted to the sternum,
- ★ Easy to set and disassemble,
- ★ Resterizable in usual conditions.

DC30424-40



Blade For Silicone Pad

- ★ Dedicated to be set with the silicone pad,
- ★ Reusable,
- ★ To use with Delacroix-Chevalier Dubost retractor : DC30400-00.

Also exists for Bypass retractor : see the chart below.



DC30424-40



DC30991-40



You have the retractor

Designation	Code
Dubost Retractor	DC30400-00
Bypass Retractor	DC30700- 00

Silicone Pads

Dedicated Blade	Silicone pad
DC30424-40	DC30991-40
DC30734-40	DC30991-40


Delacroix-Chevalier
Paris

Corporate office

13, Avenue de la République - 75011 Paris - France

Customer service

Z.I. la Vendue - B.P. 2152 - 52906 Chaumont Cedex 9 - France

Tel. : +33 (0) 3 25 02 10 35 - Fax : +33 (0) 3 25 02 10 20 - Email : export@delacroix-chevalier.com - www.delacroix-chevalier.com

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC30734-40	PAIRE DE VALVES DUBOST POUR BANDE SILICONE I:97MM P:40MM POUR ECARTEUR BYPASS+	3661219289746
	PAIR OF DUBOST BLADES FOR BYPASS+ RETRACTOR FOR SILICONE PAD W:97MM D:40MM	 3 661219 289746

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Brochure DC Silicone Pads

2

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*