

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC31411-41	ECARTEUR PAIRE DE VALVES BURFORD I:42MM P:40MM ALUMINIUM	3661219130345
	BURFORD ADULT RETRACTOR L:195MM W:65MM D:40&72MM MAX OPENING:200MM	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

03-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

3 - Retractors




Burford Adult Retractors / Écarteurs Burford Adulte / Separadores Burford Adulto



Aluminum
Aluminium
Aluminio

Burford

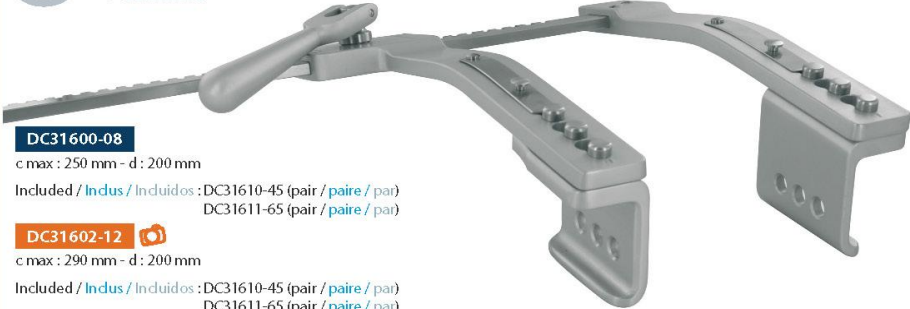

DC31600-08
c max : 250 mm - d : 200 mm
Included / Inclus / Incluidos : DC31610-45 (pair / paire / par)
DC31611-65 (pair / paire / par)

DC31602-12 
c max : 290 mm - d : 200 mm
Included / Inclus / Incluidos : DC31610-45 (pair / paire / par)
DC31611-65 (pair / paire / par)




Pair / Paire / Par
DC31610-45
a : 60 mm - b : 45 mm



Pair / Paire / Par
DC31611-65
a : 60 mm - b : 65 mm



Pair / Paire / Par
DC31411-41
a : 42 mm - b : 40 mm

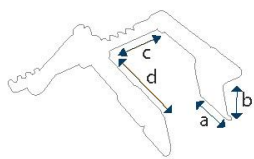

32



Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC31411-41	ECARTEUR PAIRE DE VALVES BURFORD I:42MM P:40MM ALUMINIUM	3661219130345
	BURFORD ADULT RETRACTOR L:195MM W:65MM D:40&72MM MAX OPENING:200MM	 3 661219 130345

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + ALUMINIUM / STAINLESS STEEL + ALUMINIUM

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X2CrNi19-11(1.4306) + ALUMINIM/AU4G

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

03-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).