

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC34700-21	VALVE A MAIN L:190MM I:15MM P:21MM	3661219131762
	HAND RETRACTOR L:190MM W:15MM D:21MM	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2008

Chapitre-page

03-058

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

3 - Hand Retractors and Hooks

Langenbeck Hand Retractor



DC34600-60
Scale : 4/5




Scale : 1/1

DC34600-55
A - L : 210 mm 8 " Width 20 mm Depth : 55 mm

DC34600-60
B - L : 210 mm 8 " Width 20 mm Depth : 60 mm


DC34600-63
C - L : 210 mm 8 " Width 20 mm Depth : 63 mm

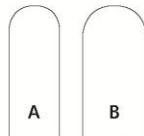

Scale : 1/1

DC34600-30
A - L : 210 mm 8 " Width 11 mm Depth : 30 mm

DC34600-31
B - L : 210 mm 8 " Width 14 mm Depth : 30 mm

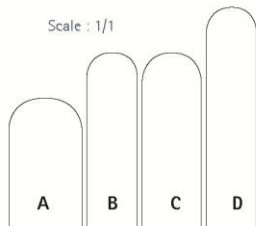

Scale : 1/1


DC34600-33
A - L : 210 mm 8 " Width 16 mm Depth : 30 mm

DC34600-40
B - L : 210 mm 8 " Width 11 mm Depth : 40 mm

DC34600-42
C - L : 210 mm 8 " Width 13 mm Depth : 40 mm

DC34600-50
D - L : 210 mm 8 " Width 11 mm Depth : 50 mm

Kocher

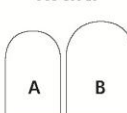

Scale : 1/1

DC34700-19
A - L : 190 mm 7 1/2 " Width : 12 mm Depth : 19 mm

DC34700-21
B - L : 190 mm 7 1/2 " Width : 15 mm Depth : 21 mm



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC34700-21	VALVE A MAIN L:190MM I:15MM P:21MM	3661219131762
	HAND RETRACTOR L:190MM W:15MM D:21MM	 3 661219 131762

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

45918

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2008

03-058

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*