

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC41210-54	CLAMP BULLDOG DE BAKEY DIETHRICH L:54MM COURBE MORS:20MM PRESSION 180GR	3661219135623
	DE BAKEY DIETHRICH BULLDOG CLAMP L:54MM CURVED JAWS:20MM PRESSURE 180GR	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-008

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Diethrich Bulldog Clamps / Clamps Bulldog Diethrich / Clamps Bulldog Diethrich

Pressure / Pression / Presión : 80 g

Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas



Straight
Droits
Rectas

DC41220-49
L : 47 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm

DC41220-53
L : 50 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41220-57
L : 59 mm - 2 1/4"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

Diethrich



Angled
Coudés
Anguladas

DC41230-48
L : 45 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm

DC41230-50
L : 48 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41230-52
L : 53 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

Smooth Jaws
Mors Lisses
Bocas Lisas



Angled
Coudés
Anguladas

DC41240-50
L : 50 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41240-55
L : 55 mm - 2 1/4"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

Pressure / Pression / Presión : 180 g



DeBakey

Straight
Droits
Rectas

DC41200-47
L : 51 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 10 mm

DC41200-51
L : 55 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41200-57
L : 57 mm - 2 1/5"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Angled
Coudés
Anguladas

DC41210-44
L : 47 mm - 1 4/5"
Jaws / Mors / Bocas : 10 mm

DC41210-46
L : 50 mm - 1 4/5"
Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41210-49
L : 53 mm - 2"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Curved
Courbes
Curvas

DC41210-54
L : 54 mm - 2 1/5"
Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

4.1 - Small Clamps

8

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC41210-54	CLAMP BULLDOG DE BAKEY DIETHRICH L:54MM COURBE MORS:20MM PRESSION 180GR	3661219135623
	DE BAKEY DIETHRICH BULLDOG CLAMP L:54MM CURVED JAWS:20MM PRESSURE 180GR	 3 661219 135623

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62470

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-008

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*