

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC41526-05TI	CLAMP BULLDOG ATRAUMA L:050MM TRES COURBE TITANE	3661219136125
	ATRAUMATIC BULLDOG CLAMP L:050MM STRONGLY CURVED TI	 3 661219 136125

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-019

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Atraumatic Bulldog Clamps / *Clamps Bulldog Atraumatiques* / Clamps Bulldog Atraumáticos

Mini Glover Strongly Curved / *Mini Glover Très Courbe* / Mini Glover Muy Curvo

Pressure / *Pression* / Presión : 400 g



Artery
Artères
Arterias

DC41520-03	
L : 30 mm - 1 1/8"	
DC41522-03	
L : 35 mm - 1 1/4"	
 DC41524-04	
L : 40 mm - 1 3/8"	
DC41526-05	
L : 50 mm - 1 7/8"	

Pressure / *Pression* / Presión : 200 g



Vein
Veines
Venas

DC41521-03	
L : 30 mm - 1 1/8"	
DC41523-03	
L : 35 mm - 1 1/4"	
 DC41525-04	
L : 40 mm - 1 3/8"	
DC41527-05	
L : 50 mm - 2"	

 : Add TI for Titanium Model / *Ajoutez TI pour le Modèle Titane* / Añadir TI para Modelo Titánico

4.1 - Small Clamps



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC41526-05TI	CLAMP BULLDOG ATRAUMA L:050MM TRES COURBE TITANE	3661219136125
	ATRAUMATIC BULLDOG CLAMP L:050MM STRONGLY CURVED TI	 3 661219 136125

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62470

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

TITANE / TITANIUM

Nuance matière :
Material grade :

TA6V(TITANE)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-019

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*