

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC41808-14	APPLICATEUR POUR CLIPS BIEMER APPROXIMATEURS DC41819 L:145MM SANS VERROU	3661219400479
	BIEMER APPROXIMATORS APPLYING FORCEPS FOR DC41819 L:145MM WITHOUT LOCK	 3 661219 400479

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-003

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Biemer Bulldog Clips Approximators / *Clips Approximateurs Biemer / Clips Aproximadores Biemer*

Temporary Use / *Usage Temporaire / Uso Temporal*

Applying Forceps
Applicateur
Aplicador



DC41808-14
L: 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / *Mors* / Bocas: 12 mm
Without Lock / *Sans Verrou* / Sin Cerradura

Pressure / *Pression* / Presión: 20 - 30 g



DC41818-03
L: 17 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm



DC41819-04
L: 17 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm

Pressure / *Pression* / Presión: 30 - 40 g



DC41818-01
L: 15 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 6 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 4 mm



DC41819-01
L: 15 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 6 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 4 mm

DC41818-02
L: 18 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm

DC41819-02
L: 18 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm



DC41819-03
L: 16 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm



DC41819-05
L: 16 mm
Jaws / *Mors* / Bocas: 9 mm
Max Opening / *Ouverture* / Apertura: 5 mm

DC41804-14
L: 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / *Mors* / Bocas: 8 mm
Without Lock / *Sans Verrou* / Sin Cerradura

DC41805-14
L: 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / *Mors* / Bocas: 12 mm
With Lock / *Avec Verrou* / Con Cerradura

 1/1

3

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC41808-14	APPLICATEUR POUR CLIPS BIEMER APPROXIMATEURS DC41819 L:145MM SANS VERROU	3661219400479
	BIEMER APPROXIMATORS APPLYING FORCEPS FOR DC41819 L:145MM WITHOUT LOCK	 3 661219 400479

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

42468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-003

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*