

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC42002-45	MICRO CLAMP VASC NEONATAL DE BAKEY CASTANEDA L:120MM BRANCHES DROITES MORS 45° MORS:1,4MM	3661219136330
	DE BAKEY CASTANEDA NEONATAL MICRO VASCULAR CLAMP L:120MM STRAIGHT SHANKS 45° JAWS JAWS:1,4MM	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-031

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas

No Scale / Pas d'Echelle / Sin Escala




DeBakey

Castaneda

4.1 - Small Clamps


DC42000-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42001-30
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42002-45
L: 125 mm - 5°


DC42003-60
L: 110 mm - 4 2/5°


DC42004-90
L: 105 mm - 4 1/5°


DC42005-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42006-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42007-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42008-00
L: 115 mm - 4 3/5°


DC42009-00
L: 110 mm - 4 2/5°


DC42010-00
L: 115 mm - 4 3/5°


DC42011-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42012-00
L: 130 mm - 5 1/5°


DC42013-00
L: 115 mm - 4 3/5°


DC42014-00
L: 110 mm - 4 2/5°


DC42015-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42016-00
L: 120 mm - 4 4/5°


DC42017-00
L: 120 mm - 4 4/5°

 1/1

31

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC42002-45	MICRO CLAMP VASC NEONATAL DE BAKY CASTANEDA L:120MM BRANCHES DROITES MORS 45° MORS:1,4MM	3661219136330
	DE BAKY CASTANEDA NEONATAL MICRO VASCULAR CLAMP L:120MM STRAIGHT SHANKS 45° JAWS JAWS:1,4MM	 3 661219 136330

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*