

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC43710-21	DISSECTEUR GEMINI L:200MM 1/2 COURBE FIN	3661219265917
	GEMINI DISSECTOR L:200MM FINE 1/2 CURVED	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

01-045

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

1 - Dissection



Gemini Dissectors / Dissecteurs Gemini / Disectores Gemini

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Gemini

DC43710-13
L: 140 mm - 5 25/8"

Jaws / Mors / Bocas: 1.6 mm

DC43710-18
L: 180 mm - 7"

Jaws / Mors / Bocas: 1.8 mm

DC43710-21
L: 205 mm - 8 1/8"

Jaws / Mors / Bocas: 2.0 mm

DC43710-23
L: 230 mm - 9"

Jaws / Mors / Bocas: 2.0 mm

DC43710-25
L: 250 mm - 9 4/5"

Jaws / Mors / Bocas: 2.0 mm

DC43710-28
L: 280 mm - 11"

Jaws / Mors / Bocas: 2.0 mm

DC43711-13
L: 135mm - 5 25/8"

DC43711-18
L: 180mm - 7"

DC43711-21
L: 210mm - 8 1/8"

DC43711-23
L: 230mm - 9"

DC43711-25
L: 250mm - 9 4/5"

DC43711-28
L: 280mm - 11"

1 - Dissection

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC43710-21	DISSECTEUR GEMINI L:200MM 1/2 COURBE FIN	3661219265917
	GEMINI DISSECTOR L:200MM FINE 1/2 CURVED	 3 661219 265917

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

01-045

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).