

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC45910-15	PINCE A SAISIR TISSUS ET ORGANES ALLIS L:155MM	3661219138532
	ALLIS TISSUE SEIZING FORCEPS L:155MM	 3 661219 138532

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.2-066

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Allis Clamps / Clamps Allis / Clamps Allis

Atraumatic Jaws
Mors Atraumatiques
Bocas Atraumáticas



B65495
L : 160 mm - 6 1/2"



B65500
L : 200 mm - 7 4/5"



Atraumatic Jaws
Mors Atraumatiques
Bocas Atraumáticas



DC45910-15
L : 155 mm - 6"

DC45911-20
L : 195 mm - 7 23/32"

DC45912-22
L : 220 mm - 8 23/32"

DC45913-25
L : 250 mm - 9 4/5"

DC45914-30
L : 300 mm - 11 4/5"

Allis

2 x 3



DC45900-15
L : 150 mm - 5 4/5"

Judd Allis

3 x 4



DC45901-15
L : 150 mm - 5 4/5"

DC45902-19
L : 190 mm - 7 1/2"

Baby Allis

4 x 5



DC45903-14
L : 140 mm - 5 1/2"

DC45904-15
L : 150 mm - 5 4/5"

Allis

5 x 6



DC45905-15
L : 150 mm - 5 4/5"

DC45906-19
L : 190 mm - 7 1/2"

DC45907-25
L : 250 mm - 9 4/5"

4.2 - Clamps

66

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC45910-15	PINCE A SAISIR TISSUS ET ORGANES ALLIS L:155MM	3661219138532
	ALLIS TISSUE SEIZING FORCEPS L:155MM	 3 661219 138532

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.2-066

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).