

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50341-18	MICRO PORTE AIGUILLE JACOBSON L:180MM MANCHE ROND DROIT I:1.0MM AVEC CREMAILLERE TUNGSTENE	3661219140047
	JACOBSON MICRO N H L:180MM ROUND HANDLE STRAIGHT W:1.0MM W/ RATCHET TC	 3 661219 140047

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-015

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Micro Needle Holders / *Micro Porte-Aiguilles* / Micro Porta Agujas

Smooth Jaws - Width: 1.0 mm - For Suture: 8/0 -> 6/0 - Round Handle
Mors Lisses - Largeur: 1,0 mm - Pour Suture: 8/0 -> 6/0 - Manche Rond
 Bocas Lisas - Anchura: 1,0 mm - Para Sutura: 8/0 -> 6/0 - Mango Redondo


TC Inserts

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
 Recta - Sin Cerrojo

-  **DC50350-12**
L: 120 mm - 4 ³/₄"
-  **DC50350-14**
L: 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50351-18**
L: 180 mm - 7"
-  **DC50352-21**
L: 205 mm - 8"
-  **DC50353-23**
L: 225 mm - 9"
-  **DC50353-25**
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
 Curva - Sin Cerrojo

-  **DC50370-12**
L: 120 mm - 4 ³/₄"
-  **DC50370-14**
L: 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50371-18**
L: 180 mm - 7"
-  **DC50372-21**
L: 205 mm - 8"
-  **DC50373-23**
L: 225 mm - 9"
- **DC50373-25**
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"



Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
 Recta - Con Cerrojo

-  **DC50340-12**
L: 120 mm - 4 ³/₄"
-  **DC50340-14**
L: 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50341-18**
L: 180 mm - 7"
-  **DC50342-21**
L: 205 mm - 8"
-  **DC50343-23**
L: 225 mm - 9"
-  **DC50343-25**
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
 Curva - Con Cerrojo

-  **DC50360-12**
L: 120 mm - 4 ³/₄"
-  **DC50360-14**
L: 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50361-18**
L: 180 mm - 7"
-  **DC50362-21**
L: 205 mm - 8"
-  **DC50363-23**
L: 225 mm - 9"
- **DC50363-25**
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

5 - Suture

15

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50341-18	MICRO PORTE AIGUILLE JACOBSON L:180MM MANCHE ROND DROIT I:1.0MM AVEC CREMAILLERE TUNGSTENE	3661219140047
	JACOBSON MICRO N H L:180MM ROUND HANDLE STRAIGHT W:1.0MM W/ RATCHET TC	 3 661219 140047

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-015

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*