

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50473-23TI	MICRO PORTE AIGUILLE JACOBSON L:230MM MANCHE ROND COURBE 1:1.2MM SANS CREMAILLERE DIAMONITE TITANE	3661219266327
	JACOBSON MICRO N H L:230MM ROUND HANDLE CURVED W:1.2MM W/O RATCHET TITANE	 3 661219 266327

Catalogues / catalogs

Delacroix 2011

Chapitre-page

05-012

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

Micro Needle Holders - Micro Porte-Aiguilles

Micro Needle Holders

Micro Porte-Aiguilles

Round Handle - Smooth Jaws - Width 1.2 mm - Suture from 9/0 to 7/0
Manche Rond - Mors Lisses - Largeur 1,2 mm - Pour Suture de 9/0 à 7/0



 1/1

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou

DC50450-14
L : 145 mm - 5 3/4"

DC50451-18
L : 180 mm - 7"

DC50452-21
L : 205 mm - 8"

DC50453-23 
L : 225 mm - 9"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou

DC50440-14
L : 145 mm - 5 3/4"

DC50441-18
L : 180 mm - 7"

DC50442-21
L : 205 mm - 8"

DC50443-23 
L : 225 mm - 9"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou

DC50470-14
L : 145 mm - 5 3/4"

DC50471-18
L : 180 mm - 7"

DC50472-21
L : 205 mm - 8"

DC50473-23 
L : 225 mm - 9"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou

DC50460-14
L : 145 mm - 5 3/4"

DC50461-18
L : 180 mm - 7"

DC50462-21
L : 205 mm - 8"

DC50463-23 
L : 225 mm - 9"



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50473-23TI	MICRO PORTE AIGUILLE JACOBSON L:230MM MANCHE ROND COURBE I:1.2MM SANS CREMAILLE DIAMONITE TITANE	3661219266327
	JACOBSON MICRO N H L:230MM ROUND HANDLE CURVED W:1.2MM W/O RATCHET TITANE	 3 661219 266327

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

TITANE + TUNGSTENE / TITANIUM + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

TA6V(Titane) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2011

05-012

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*