

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50630-19TI	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN JACOBSON MODELE EPAIS L:190MM MANCHE ROND DROIT AVEC CREMAILLERE TITANE	3661219140948
	HEAVY STYLE JACOBSON MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:190MM ROUND HANDLE STRAIGHT W/ RATCHET DIAMONITE TI	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-027

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Jacobson Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles Jacobson / Micro Porta Aguja Jacobson

Heavy Style - Diamonite - Streamline - Round Handle: Ø 10 mm - For Suture: 4/0 -> 2/0
Modèle Fort - Diamonite - Streamline - Manche Rond: Ø 10 mm - Pour Suture: 4/0 -> 2/0
Modelo Fuerte - Diamonite - Streamline - Mango Redondo: Ø 10 mm - Para Sutura: 4/0 -> 2/0



Diamonite




Streamline

2 mm



DC50631-19 
L: 190 mm - 7 1/2"
DC50635-23 
L: 230 mm - 9"
DC50641-25 
L: 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

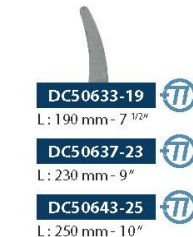

DC50633-19 
L: 190 mm - 7 1/2"
DC50637-23 
L: 230 mm - 9"
DC50643-25 
L: 250 mm - 10"

Jacobson



DC50630-19 
L: 190 mm - 7 1/2"
DC50634-23 
L: 230 mm - 9"
DC50640-25 
L: 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo



DC50632-19 
L: 190 mm - 7 1/2"
DC50636-23 
L: 230 mm - 9"
DC50642-25 
L: 250 mm - 10"

 Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titánico



5 - Suture

27

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50630-19TI	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN JACOBSON MODELE EPAIS L:190MM MANCHE ROND DROIT AVEC CREMAILLERE TITANE	3661219140948
	HEAVY STYLE JACOBSON MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:190MM ROUND HANDLE STRAIGHT W/ RATCHET DIAMONITE TI	 3 661219 140948

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

TITANE + TUNGSTENE / TITANIUM + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

TA6V(Titane) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-027

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*