

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50646-19	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN JACOBSON MODELE EPAIS L:190MM MANCHE ROND COURBE TC AVEC CREMAILLERE	3661219318026
	HEAVY STYLE JACOBSON MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:190MM ROUND HANDLE CURVED W/ RATCHET TUNGSTEN	 3 661219 318026

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-025

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Jacobson Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles Jacobson / Micro Porta Agujas Jacobson

Heavy Style - TC Inserts - Streamline - Round Handle : Ø 10 mm - For Suture : 4/0 -> 2/0
Modèle Fort - Inserts TC - Streamline - Manche Rond : Ø 10 mm - Pour Suture : 4/0 -> 2/0
Modelo Fuerte - Insertos TC - Streamline - Mango Redondo : Ø 10 mm - Para Sutura : 4/0 -> 2/0



TC Inserts



Streamline

2 mm

Jacobson



2 mm

Jacobson



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50645-19
L : 190 mm - 7 1/2"

DC50645-23
L : 230 mm - 9"

DC50645-25
L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50647-19
L : 190 mm - 7 1/2"

DC50647-23
L : 230 mm - 9"

DC50647-25
L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50644-19
L : 190 mm - 7 1/2"

DC50644-23
L : 230 mm - 9"

DC50644-25
L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50646-19
L : 190 mm - 7 1/2"

DC50646-23
L : 230 mm - 9"

DC50646-25
L : 250 mm - 10"

4/5

25

5 - Suture

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50646-19	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN JACOBSON MODELE EPAIS L:190MM MANCHE ROND COURBE TC AVEC CREMAILLERE	3661219318026
	HEAVY STYLE JACOBSON MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:190MM ROUND HANDLE CURVED W/ RATCHET TUNGSTEN	 3 661219 318026

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-025

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*