

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50664-14	MICRO PORTE AIGUILLE CASTROVIEJO L:140MM MANCHE PLAT COURBE SANS CREMAILLIERE	3661219141228
	CASTROVIEJO MICRO N H L:140MM FLAT HANDLE CURVED W/O RATCHET	 3 661219 141228

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-029

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas



Diamonite

Jacobson

Castroviejo

For Suture : 10/0 -> 8/0
Pour Suture : 10/0 -> 8/0
Para Sutura : 10/0 -> 8/0

Rings Handle
À Anneaux
Con Anillos

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo



DC50614-18
L : 185 mm - 7 1/4"



DC50616-23
L : 230 mm - 9"

Smooth Jaws
Mors Lisses
Bocas Lisas

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo



DC50661-14
L : 140 mm - 5 1/2"

Curved
Courbe
Curva



DC50662-14
L : 140 mm - 5 1/2"

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo



DC50663-14
L : 140 mm - 5 1/2"

Curved
Courbe
Curva



DC50664-14
L : 140 mm - 5 1/2"















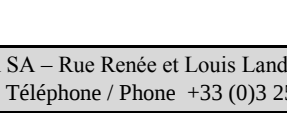

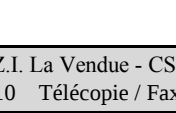





LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50664-14	MICRO PORTE AIGUILLE CASTROVIEJO L:140MM MANCHE PLAT COURBE SANS CREMAILLERE	3661219141228
	CASTROVIEJO MICRO N H L:140MM FLAT HANDLE CURVED W/O RATCHET	 3 661219 141228

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-029

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*