

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50703-25TI	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN L:250MM MANCHE ROND D:8MM AVEC CREMAILLERE MORS DROITS l:0,8MM DIAMONITE TITANE	3661219389804
	MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:250MM ROUND HANDLE D:8MM W/ RATCHET STRAIGHT JAWS l:0,8MM DIAMONITE TI	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-013

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas



Diamonite



Streamline

Width: 0.8 mm - For Suture: 9/0 -> 7/0 - Round Handle
 Largeur: 0.8 mm - Pour Suture: 9/0 -> 7/0 - Manche Rond
 Anchura: 0.8 mm - Para Sutura: 9/0 -> 7/0 - Mango Redondo



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

- DC50702-18 
L: 180 mm - 7"
- DC50702-21 
L: 210 mm - 8"
- DC50702-23 
L: 230 mm - 9"
- DC50702-25 
L: 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

- DC50712-18 
L: 180 mm - 7"
- DC50712-21 
L: 210 mm - 8"
- DC50712-23 
L: 230 mm - 9"
- DC50712-25 
L: 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

- DC50703-18 
L: 180 mm - 7"
-  DC50703-21 
L: 210 mm - 8"
- DC50703-23 
L: 230 mm - 9"
- DC50703-25 
L: 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

- DC50713-18 
L: 180 mm - 7"
- DC50713-21 
L: 210 mm - 8"
- DC50713-23 
L: 230 mm - 9"
- DC50713-25 
L: 250 mm - 10"

 Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane /
Añadir TI para Modelo Titano



5 - Suture

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50703-25TI	MICRO PORTE AIGUILLE STREAMLINE DESIGN L:250MM MANCHE ROND D:8MM AVEC CREMAILLERE MORS DROITS l:0,8MM DIAMONITE TITANE	3661219389804
	MICRO N H STREAMLINE DESIGN L:250MM ROUND HANDLE D:8MM W/ RATCHET STRAIGHT JAWS l:0,8MM DIAMONITE TI	 3 661219 389804

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

12726

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

TITANE + TUNGSTENE / TITANIUM + TUNGSTEN

Material type :

Nuance matière :

TA6V(Titane) + TUNGSTENE

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Delacroix 2020

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

05-013

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).