

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC51050-22	PORTE AIGUILLE GAMME PARIS DROIT FIN 225 MM DIAMONITE	3661219266358
	PARIS NEEDLE HOLDER FINE L:225MM	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-032

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Pitches of Ring Handle Needle Holders

Pas des Striures des Mors de Porte-Aiguilles à Anneaux / Pasos de Las Estrias de Porta Aguja con Anillos

5 - Suture

32



0.3 mm



DC51100-15	p 35
DC51100-18	p 35
DC51100-20	p 35
DC51100-23	p 35
DC51110-13	p 36
DC51110-15	p 36
DC51110-18	p 36
DC51110-20	p 36
DC51110-23	p 36
DC51110-26	p 36

DC51120-15	p 37
DC51120-18	p 37
DC51120-20	p 37
DC51120-23	p 37
DC51140-18	p 39
DC51140-20	p 39
DC51140-23	p 39
DC51140-26	p 39
DC51140-30	p 39



0.4 mm



DC51000-23	p 34
DC51010-24	p 33
DC51010-27	p 33
DC51011-24	p 33
DC51011-27	p 33
DC51130-13	p 38
DC51130-15	p 38
DC51130-18	p 38
DC51130-20	p 38
DC51130-23	p 38
DC51130-26	p 38
DC51141-23	p 43
DC51141-26	p 43

DC51150-18	p 40
DC51150-20	p 40
DC51150-23	p 40
DC51150-26	p 40
DC51150-30	p 40
DC51160-15	p 41
DC51160-18	p 41
DC51160-20	p 41
DC51160-23	p 41
DC51160-26	p 41
DC51160-30	p 41
G306300	p 46
G30640	p 46



0.5 mm



DC51012-24	p 33
DC51012-27	p 33
DC51170-16	p 42
DC51170-18	p 42
DC51170-20	p 42
DC51170-24	p 42

DC51170-26	p 42
DC51170-30	p 42
DC51171-20	p 42
DC51171-24	p 42
DC51171-26	p 42

Copyright LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC51050-22	PORTE AIGUILLE GAMME PARIS DROIT FIN 225 MM DIAMONITE	3661219266358
	PARIS NEEDLE HOLDER FINE L:225MM	 3 661219 266358

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-032

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).