

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71350-08	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER 45° COURBE D:08CH AVEC CONTROLE D'ASPIRAT° S	3661219143062
	FRAZIER SUCTION TUBE 45° CURVED DIA:08FR W/ SUCT° CONTROL ON FINGERPLATE	 3 661219 143062

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

06-007

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Frazier Suction Tubes / *Canules d'Aspiration Frazier* / *Canulas de Aspiración Frazier*

With Suction Control Handle / *Avec Contrôle Manuel de l'Aspiration* / *Con Control Manual de la Aspiración*

Frazier



DC71350-03

○ Ø : 03 Fr

DC71350-04

○ Ø : 04 Fr

DC71350-05

○ Ø : 05 Fr



DC71350-06

○ Ø : 06 Fr

DC71350-07

○ Ø : 07 Fr

DC71350-08

○ Ø : 08 Fr

DC71350-09

○ Ø : 09 Fr

DC71350-10

○ Ø : 10 Fr

DC71350-11

○ Ø : 11 Fr

DC71350-12

○ Ø : 12 Fr

DC71350-13

○ Ø : 13 Fr

DC71350-14

○ Ø : 14 Fr



7

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC71350-08	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER 45° COURBE D:08CH AVEC CONTROLE D'ASPIRAT° S	3661219143062
	FRAZIER SUCTION TUBE 45° CURVED DIA:08FR W/ SUCT° CONTROL ON FINGERPLATE	 3 661219 143062

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / REGULATORY INFORMATION

Classe CE :
CE Class :

Ila

Code GMDN :
GMDN code :

57822

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED PERFORMANCE

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / SPECIFIC FEATURES

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Delacroix 2020

06-007

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / PACKAGING

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).