

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71350-10	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER 45° COURBE D:10CH AVEC CONTROLE D'ASPIRAT° S	3661219143086
	<i>FRAZIER SUCTION TUBE 45° CURVED DIA:10FR W/ SUCT° CONTROL ON FINGERPLATE</i>	 3 661219 143086

Catalogues / *catalogs*

Delacroix 2020

Chapitre-page

06-007

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Frazier Suction Tubes / *Canules d'Aspiration Frazier* / *Canulas de Aspiración Frazier*

With Suction Control Handle / *Avec Contrôle Manuel de l'Aspiration* / *Con Control Manual de la Aspiración*

Frazier



DC71350-03 

Ø : 03 Fr

DC71350-04

Ø : 04 Fr

DC71350-05

Ø : 05 Fr



DC71350-06

Ø : 06 Fr

DC71350-07

Ø : 07 Fr

DC71350-08

Ø : 08 Fr

DC71350-09 

Ø : 09 Fr

DC71350-10

Ø : 10 Fr

DC71350-11

Ø : 11 Fr

DC71350-12

Ø : 12 Fr

DC71350-13

Ø : 13 Fr

DC71350-14

Ø : 14 Fr



7

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71350-10	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER 45° COURBE D:10CH AVEC CONTROLE D'ASPIRAT° S	3661219143086
	FRAZIER SUCTION TUBE 45° CURVED DIA:10FR W/ SUCT° CONTROL ON FINGERPLATE	 3 661219 143086

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

Ila

Code GMDN :
GMDN code :

57822

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

06-007

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*