

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO
		Indice : 2 Date : 01/06/2018

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71396-06	CANULE D'ASPIRATION FUKUSHIMA AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, STYLET ET EMBOUT LUER L.UTILE:100MM D:2,0MM (CH06)	3661219303343
	FUKUSHIMA SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF, STYLET AND LUER HUB WORKING L:100MM DIAM. 2,0MM (CH06)	 3 661219 303343

Catalogues / *catalogs*

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

337

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Canules d'aspiration - Suction cannulae - Cánulas de succión

Fukushima

Longueur totale - Total length - Longitud total	165 mm - 6 ^{1/2} "	180 mm - 7"	205 mm - 8"	230 mm - 9"
Longueur utile - Working length - Longitud útil	100 mm - 4"	115 mm - 4 ^{1/2} "	140 mm - 5 ^{1/2} "	165 mm - 6 ^{1/2} "
Fr/Ch 4 - Ø : 1,3 mm	DC71396-04	DC71397-04	DC71398-04	DC71399-04
Fr/Ch 5 - Ø : 1,7 mm	DC71396-05	DC71397-05	DC71398-05	DC71399-05
Fr/Ch 6 - Ø : 2,0 mm	DC71396-06	DC71397-06	DC71398-06	DC71399-06
Fr/Ch 7 - Ø : 2,3 mm	DC71396-07	DC71397-07	DC71398-07	DC71399-07
Fr/Ch 8 - Ø : 2,7 mm	DC71396-08	DC71397-08	DC71398-08	DC71399-08
Fr/Ch 9 - Ø : 3,0 mm	DC71396-09	DC71397-09	DC71398-09	DC71399-09
Fr/Ch 12 - Ø : 4,0 mm	DC71396-12	DC71397-12	DC71398-12	DC71399-12



U : Longueur utile
U : Working length
U : Longitud útil

Copyright © LANDANGER - 2019



337

IX - Divers
IX - Miscellaneous
IX - Diversos

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71396-06	CANULE D'ASPIRATION FUKUSHIMA AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, STYLET ET EMBOUT LUER L.UTILE:100MM D:2,0MM (CH06)	3661219303343
	FUKUSHIMA SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF, STYLET AND LUER HUB WORKING L:100MM DIAM. 2,0MM (CH06)	 3 661219 303343

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

Ia

Code GMDN :
GMDN code :

57822

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X8CrNiS18-9(1.4305, 303)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

337

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).