

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC71410-70	DILATATEUR VASCULAIRE DEBAKEY 7,0mm 19CM	3661219266549
	DEBAKEY VASCULAR DILATOR 7,0MM 19CM	 3 661219 266549

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

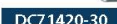
Chapitre-page

06-004

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Dilators / Testeurs / Compradores

DeBaKey	Garrett
 DC71410-05 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 0,5 mm	 DC71420-05 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 0,5 mm
 DC71410-10 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 1 mm	 DC71430-05 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 0,5 mm
 DC71410-15 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 1,5 mm	 DC71420-10 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 1 mm
 DC71410-20 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 2 mm	 DC71430-10 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 1 mm
 DC71410-25 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 2,5 mm	 DC71420-15 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 1,5 mm
 DC71410-30 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 3 mm	 DC71430-15 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 1,5 mm
 DC71410-35 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 3,5 mm	 DC71420-20 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 2 mm
 DC71410-40 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 4 mm	 DC71430-20 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 2 mm
 DC71410-45 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 4,5 mm	 DC71420-25 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 2,5 mm
 DC71410-50 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 5 mm	 DC71430-25 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 2,5 mm
 DC71410-70 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 7 mm	 DC71420-30 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 3 mm
 DC71410-90 L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 9 mm	 DC71430-30 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 3 mm
	 DC71420-35 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 3,5 mm
	 DC71430-35 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 3,5 mm
	 DC71420-40 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 4 mm
	 DC71430-40 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 4 mm
	 DC71420-45 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 4,5 mm
	 DC71430-45 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 4,5 mm
	 DC71420-50 L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 5 mm
	 DC71430-50 L: 210 mm - 8 1/2" - Ø: 5 mm

6 - Special

4

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71410-70	DILATATEUR VASCULAIRE DEBAKEY 7,0mm 19CM	3661219266549
	DEBAKEY VASCULAR DILATOR 7,0MM 19CM	 3 661219 266549

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

11268

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

06-004

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*