

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80009-30	PORTE AIGUILLE MIS L:300MM DROIT TUNGSTENE DIA.6MM VERROUILLAGE FACILE	3661219442806
	MIS NEEDLE HOLDER L:300MM STRAIGHT TUNGSTENE DIA.6MM EASY TO LOCK	

Catalogues / *catalogs*

MIS 2021

Chapitre-page

96

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Robust Tungsten Carbide Needle Holders / *Porte-Aiguilles Robustes Tungstène / Porta Agujas de Tungsteno*



TC Inserts



Easy Lock System

Ø 5 mm / Ø 6 mm

Suture from 5/0 to 2/0
Suture de 5/0 à 2/0
Sutura desde 5/0 hasta 2/0

Very Strong Tightening
Préhension Puissante
Apriete Muy Sólido

Straight
Droit
Recta

Curved
Courbe
Curva

Ø 6 mm

Ø 5 mm


Patent
Breveté
Patentado

DC80009-25 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 250 mm - 10"

DC80009-30 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 300 mm - 11 4/5"

DC80009-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80009-43 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 430 mm - 17"

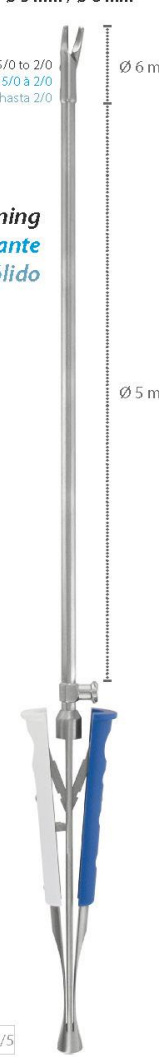

DC80019-25 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 250 mm - 10"

DC80019-30
L : 300 mm - 11 4/5"

DC80019-36 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80019-43 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 430 mm - 17"

Suture
Suture
Sutura

3/5

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80009-30	PORTE AIGUILLE MIS L:300MM DROIT TUNGSTENE DIA.6MM VERROUILLAGE FACILE	3661219442806
	MIS NEEDLE HOLDER L:300MM STRAIGHT TUNGSTENE DIA.6MM EASY TO LOCK	 3 661219 442806

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMER + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL +
POLYMER + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + POLYPROPYLENE + TUNGSTENE

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

96

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).