

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80221-36	PINCE ATRAUMATIQUE MIS L:360MM DROITE I:1,5MM DIA. 3.5MM / 5MM	3661219449676
	MIS ATRAUMATIC FORCEPS L:360MM STRAIGHT W:1,5MM DIA. 3.5MM / 5MM	

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

6

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Dissection
Dissection
Dissection



Dissecting Forceps / *Pinces à Dissection* / *Pinzas para Disección*

Ø 3.5 mm / Ø 5 mm



DeBakey

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

Straight
Droite
Recta



1.5 mm

DC80221-30
L : 300 mm - 11 ⁴/₅"

DC80221-36 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 360 mm - 14 ¹/₄"



Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

Curved
Courbe
Curva



2.75 mm

DC80224-30
L : 300 mm - 11 ⁴/₅"

DC80224-36 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 360 mm - 14 ¹/₅"



2.75 mm

DC80220-30 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 300 mm - 11 ⁴/₅"

DC80220-36 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 360 mm - 14 ¹/₅"



2.75 mm

DC80227-30
L : 300 mm - 11 ⁴/₅"

DC80227-36 NEW NOUVEAU NUEVO
L : 360 mm - 14 ¹/₅"

6

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80221-36	PINCE ATRAUMATIQUE MIS L:360MM DROITE I:1,5MM DIA. 3.5MM / 5MM	3661219449676
	MIS ATRAUMATIC FORCEPS L:360MM STRAIGHT W:1,5MM DIA. 3.5MM / 5MM	 3 661219 449676

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + POLYPROPYLENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

6

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*