

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80232-30	PINCE A DISSECTION MIS L:300MM DIA.5MM MORS DEBAKEY LONGS 2.8X35MM	3661219438557
	MIS FORCEPS L:300MM DIA.5MM LONG 2.8X35MM DEBAKEY JAWS	

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

8

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Dissection
Dissection
Dissection



Dissecting Forceps / *Pinces à Dissection* / *Pinzas para Disección*

Ø 5 mm



DeBakey

Straight
Droite
Recta

1.5 mm



DC80201-30
L : 300 mm - 11 4/5"

DC80201-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80201-43
L : 430 mm - 17"

2.75 mm



DC80200-24
L : 240 mm - 9 1/2" NEW NOUVEAU NUEVO

DC80200-28
L : 280 mm - 11"

DC80200-30
L : 300 mm - 11 4/5"

NEW NOUVEAU NUEVO DC80200-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80200-43
L : 430 mm - 17" NEW NOUVEAU NUEVO



Straight
Droite
Recta

Only One Mobile Jaw
Un Seul Mors Mobile
Sólo Una Boca Móvil

Teeth / *Dents* / *Dientes* : 2 x 3

5 mm



DC80208-30
L : 300 mm - 11 4/5" NEW NOUVEAU NUEVO

NEW NOUVEAU NUEVO DC80208-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80208-43
L : 430 mm - 17" NEW NOUVEAU NUEVO

2.8 mm



DC80232-30
L : 300 mm - 11 4/5" NEW NOUVEAU NUEVO

NEW NOUVEAU NUEVO DC80232-36
L : 360 mm - 14 1/5"

8

3/5

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80232-30	PINCE A DISSECTION MIS L:300MM DIA.5MM MORS DEBAKEY LONGS 2.8X35MM	3661219438557
	MIS FORCEPS L:300MM DIA.5MM LONG 2.8X35MM DEBAKEY JAWS	 3 661219 438557

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + POLYPROPYLENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

8

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*