

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80915-29	VATS CISEAUX LAMES MOUSSES 35MM COURBES GAUCHES LUT:200MM LTOT:290MM D:10MM	3661219451082
	VATS SCISSORS 35MM BLUNT CURVED LEFT BLADES WL:200MM TL:290MM D:10MM	 3 661219 451082

Catalogues / *catalogs*

MIS 2021

Chapitre-page

43

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Transthoracic Scissors / *Ciseaux Transthoraciques / Tijeras Transtorácicas*



Curved Blades
*Lames Courbes
Lamas Curvas*

DC80915-29
L : 290 mm - 11^{3/8"}

DC80915-42
L : 420 mm - 16^{1/2"}



DC80461-29
L : 290 mm - 11^{3/8"}

DC80461-34
L : 340 mm - 13^{3/8"}
30 mm Curved Blades
*Lames Courbes 30 mm
Lamas Curvas 30 mm*

DC80461-27S
L : 270 mm - 10^{3/8"}
10 mm Straight Blades
*Lames Droites 10 mm
Lamas Rectas 10 mm*

DC80461-27C
L : 270 mm - 10^{3/8"}
10 mm Curved Blades
*Lames Courbes 10 mm
Lamas Curvas 10 mm*

Scissors
*Ciseaux
Tijeras*

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

43

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC80915-29	VATS CISEAUX LAMES MOUSSES 35MM COURBES GAUCHES LUT:200MM LTOT:290MM D:10MM	3661219451082
	VATS SCISSORS 35MM BLUNT CURVED LEFT BLADES WL:200MM TL:290MM D:10MM	 3 661219 451082

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

43

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*