

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC81912-03	PANIER 3 POUR KIT YAN 540X250*70MM AVEC COUVERCLE ET ACCESSOIRES	3661219395737
	TRAY 3 FOR PROF YAN SET 540X250X70MM WITH LID AND ACCESSORIES	

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page


130

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION




Sterilization Trays / Paniers de Stérilisation / Cestas de Esterilización

Prof. Yan Instrument Platform - Trays Kit d'Instruments du Pr. Yan - Paniers / Kit de Instrumentos del Prof. Yan - Cestas

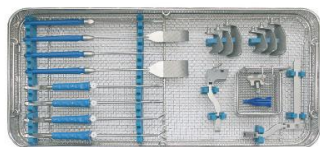


DC81912-01 *

540 x 250 x 70 mm
Provided with Lid, Instruments not Included
Livré avec Couvercle, Instruments non Inclus
Entregado con Tapa, Instrumentos no Incluidos

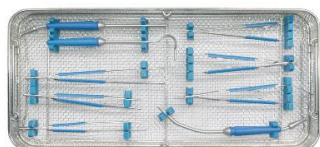

DC81912-02 *

540 x 250 x 70 mm
Provided with Lid, Instruments not Included
Livré avec Couvercle, Instruments non Inclus
Entregado con Tapa, Instrumentos no Incluidos

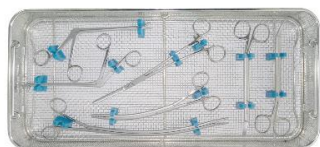

DC81912-03 *

540 x 250 x 70 mm
Provided with Lid, Instruments not Included
Livré avec Couvercle, Instruments non Inclus
Entregado con Tapa, Instrumentos no Incluidos

Kits & Trays
Kits & Paniers
Kits & Cestas

130

* For regulatory reason, please check with your distributor for availability in your country
* Por razones reglamentarias, por favor póngase en contacto con su distribuidor para conocer la disponibilidad en su país

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC81912-03	PANIER 3 POUR KIT YAN 540X250*70MM AVEC COUVERCLE ET ACCESSOIRES	3661219395737
	TRAY 3 FOR PROF YAN SET 540X250X70MM WITH LID AND ACCESSORIES	 3 661219 395737

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I-MDR

Code GMDN :

12143

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE + SILICONE / STAINLESS STEEL + SILICONE

Material type :

Nuance matière :

X2CrNi19-11(1.4306) + SILICONE

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

130

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).