

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC82162-50	PAIRE DE VALVES POUR MINI-ACCESS I:36MM P:50MM	3661219394945
	PAIR OF FINOCHIETTO BLADES FOR MINI-ACCESS W:36MM D:50MM	 3 661219 394945

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

52


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

Retractors
Écarteurs
Retradores



Yan Mini-Access Retractor / Écarteur Mini-Access Yan / Separador Mini-Access Yan

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

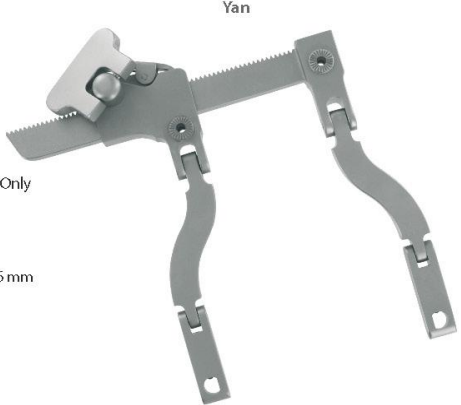

Yan

Retractor Frame Only
Cadre Seul
Base Solo
DC82160-99
c : 108 mm - d : 96 mm

Standard Blades
Valves Standards
Valvas Estándar



DC82162-30
a : 36 mm - b : 30 mm



DC82162-40
a : 36 mm - b : 40 mm



DC82162-50
a : 36 mm - b : 50 mm

Dr. Yilmaz Blades
Valves Dr Yilmaz
Valvas Dr Yilmaz



DC82163-30
a : 15 mm - b : 30 mm




DC82163-40
a : 15 mm - b : 40 mm



DC82163-50
a : 15 mm - b : 50 mm

Key Handle
Poignée
Manejar
DC82165-35
L : 35 mm

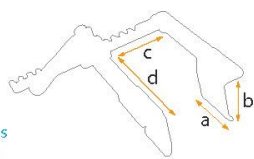

Products presented on this page are **NOT** compatible with ThorAccess retractors.
Les produits de cette page ne sont **PAS** compatibles avec les écarteurs ThorAccess
Los productos de esta página **NO** son compatibles con separadores ThorAccess

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC82162-50	PAIRE DE VALVES POUR MINI-ACCESS I:36MM P:50MM	3661219394945
	PAIR OF FINOCHIETTO BLADES FOR MINI-ACCESS W:36MM D:50MM	 3 661219 394945

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

52

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*