

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC82964-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCAR POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:70MM TUBE FILETE	3661219317609
	TROCAR AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:70MM THREADED TUBE	3 661219 317609

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

68

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

Retractors
Ecarteurs
Retradores



Trocars for Thoracoscopy / Trocarts pour Thoracoscopie / Trocares para Toracoscopia

Gossot

Reusable / Réutilisable / Reutilizable

Serrated Tube - Tube Strié - Tubo Acanalado



DC82960-07

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 3,5 mm

DC82961-07

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 5 mm

DC82962-07

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 10 mm

 **DC82963-07**

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 12 mm

DC82960-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 3,5 mm

DC82961-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 5 mm

DC82962-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 10 mm

DC82963-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 12 mm

DC82966-07

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 6 mm

 **NEW**

DC82966-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 6 mm

 **NEW**

DC82966 Compatible with Robust 6 mm Jaws Needle Holder
DC82966 Compatible avec Porte Aiguille Robuses Mors 6 mm
DC82966 Compatible sin Portaagujas Robusto Serradas de 6 mm

Threaded Tube - Tube Fileté - Tubo Roscado



 **DC82964-07**

L : 70 mm - 2 3/4" - Ø : 10 mm

DC82964-10

L : 100 mm - 4" - Ø : 10 mm

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC82964-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:70MM TUBE FILETE	3661219317609
	TROCAR AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:70MM THREADED TUBE	 3 661219 317609

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

62857

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

POLYMERE / POLYMER

Material type :

Nuance matière :

PEEK + POLYPROPYLENE

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

68

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).