

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ.026 Indice : 3 Page : 1 Date : 30/04/2002 Révisée : 07/01/2010
	MARQUAGE CE/ CE MARKING	

Version du 27/09/2017

TROCARTS DE THORACOSCOPIE

TROCART FOR THORACOSCOPY

<u>REFERENCE</u>	<u>DESIGNATION</u>
DC82960-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 3,5MM L:70MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.3,5MM L:70MM STREAKED TUBE</i>
DC82960-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 3,5MM L:100MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.3,5MM L:100MM STREAKED TUBE</i>
DC82961-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 5MM L:70MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.5MM L:70MM STREAKED TUBE</i>
DC82961-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 5MM L:100MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.5MM L:100MM STREAKED TUBE</i>
DC82962-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:70MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:70MM STREAKED TUBE</i>
DC82962-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:100MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:100MM STREAKED TUBE</i>
DC82963-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 12MM L:70MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.12MM L:70MM STREAKED TUBE</i>
DC82963-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 12MM L:100MM TUBE STRIE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.12MM L:100MM STREAKED TUBE</i>
DC82964-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:70MM TUBE FILETE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:70MM THREADED TUBE</i>
DC82964-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 10MM L:100MM TUBE FILETE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.10MM L:100MM THREADED TUBE</i>
DC82965-70	CHEMISE ET POINTE DE TROCART POUR THORACOSCOPIE DIA. 5MM L:70MM TUBE FLEXIBLE <i>TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.5MM L:70MM FLEXIBLE TUBE</i>
DC82970-07	CHEMISE ET POINTE DE TROCART OVALE POUR THORACOSCOPIE DIA. 16X25MM L:70MM TUBE LISSE <i>OVAL TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.16X25MM L:70MM SMOOTH TUBE</i>
DC82970-10	CHEMISE ET POINTE DE TROCART OVALE POUR THORACOSCOPIE DIA. 16X25MM L:100MM TUBE LISSE <i>OVAL TROCART AND CANNULA FOR THORACOSCOPY DIA.16X25MM L:100MM SMOOTH TUBE</i>
DC82971-07	POINTE POUR DC82961-07 <i>TROCART TIP FOR DC82961-07</i>
DC82971-10	POINTE POUR DC82961-10 <i>TROCART TIP FOR DC82961-10</i>



PERFORMANCES REVENDIQUEES/INTENDED USE

Instrumentation de bloc opératoire réutilisable recommandée dans le cadre d'une lobectomie ou segmentectomie par voie mini-invasive.

Reusable surgical instruments recommended for lobectomy or segmentectomy by mini-invasive way.

CARACTERISTIQUES/FEATURES

Matériaux/Material : *Propylux bleu /blue Propylux*
 Pom C bleu/ blue Pom C
 PEEK

Dimensions/Dimension : *Selon désignations/See label*

MONTAGE ET DEMONTAGE/ASSEMBLING AND DISASSEMBLING

Ne se démonte pas.

Do not disassembly

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ.026 Indice : 3 Page : 3 Date : 30/04/2002 Révisée : 07/01/2010
	MARQUAGE CE/ <i>CE MARKING</i>	

PREDESINFECTION/PREDISINFECTION

*Vérifier la compatibilité des pré-désinfectants avec les matériaux constitutifs.
Non compatible avec les pré-désinfectants contenant des chlorures.
Compatible avec procédé à la soude1N.*

*Check compatibility of materials with disinfection products
Uncompatible with disinfection product with chloride
Compatible with 1N soda*

NETTOYAGE/CLEANING

*Nettoyage en machine à laver par aspersion recommandé.
Instrument compatible avec un lavage ultra-son.*

*Cleaning in a machine with aspersion is recommended.
Instruments compatible with ultrasound cleaning.*

STERILISATION/STERILIZATION

*Autoclave min 134°C- max 137°C – 3 à 18 minutes
Steam sterilization min 134°C- max 137°C – 3 à 18 minutes*