

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC83112-36	MANCHE MIS EN V A ANNEAUX POUR EMBOUTS CISEAUX A USAGE COURT L:360MM A VERROU	3661219449867
	MIS V HANDLE WITH RINGS REPOSABLE USE SCISSORS TIPS L:360MM WITH RATCHET	 3 661219 449867

Catalogues / *catalogs*

MIS 2021

Chapitre-page

37

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Handles for Scissors Tips / *Manches pour Embouts Ciseaux / Mangos para Puntas de Tijeras*

Reposable Curved Metzenbaum Scissors
Ciseaux Metzenbaum Courbes Réutilisables
Tijeras Metzenbaum Curvas Desechables



15 mm

DC83110-02
Ø : 5 mm

Ø 5 mm



Patent
Breveté
Patentado

DC80110-30
L : 300 mm - 11 4/5"

DC80110-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC80110-44
L : 440 mm - 17 1/4"

NEW NOUVEAU NUEVO



Titanium

Registered Design
Modèle déposé
Diseño registrado

DC83112-36
L : 360 mm - 14 1/5"

DC83112-44
L : 440 mm - 17 1/4"

NEW NOUVEAU NUEVO

3/5

Scissors
Ciseaux
Tijeras

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC83112-36	MANCHE MIS EN V A ANNEAUX POUR EMBOUTS CISEAUX A USAGE COURT L:360MM A VERROU	3661219449867
	MIS V HANDLE WITH RINGS REPOSABLE USE SCISSORS TIPS L:360MM WITH RATCHET	 3 661219 449867

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TITANE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + TITANIUM + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X5CrNi18-10 (1.4301) + 1.4305 (X8CrNiS18-9) + X10CrNi18-8(1.4310) + X20Cr13 (1.4021)+ PPSU + TA6V(TITANE)

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

37

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).