

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC83208-36	DISSECTEUR MARYLAND MIS MORS 5MM L:360MM DIA.5MM A VERROU ET CONNEXION HF	3661219317852
	MIS MARYLAND DISSECTOR 5MM JAWS L:360MM DIA.5MM WITH RATCHET AND HF CONNECTION	 3 661219 317852

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

17

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



HF Monopolar Dissectors / Dissecteurs HF Monopolaires / HF Dissectores monopolares

Maryland

Curved
Courbe
Curva



2.1 mm
20 mm

DC83208-36 *

L : 360 mm - 14 1/5"

DC83208-44 *

L : 440 mm - 17 1/2"

Gossot

Long Curved Jaws
Mors Courbes Longs
Bocas Curvas Largas



2.1 mm
27 mm

DC83209-36 *

L : 360 mm - 14 1/5"

DC83209-44 *

L : 440 mm - 17 1/2"

To be Used with Ø 10mm Trocar
À Utiliser avec un Trocart de Ø 10 mm
Usar con un Trocar de Ø 10 mm



Ø 5 mm

3/5

Titanium

Patent
Breveté
Patentado

Dissection
Dissection
Dissección

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

* For regulatory reason, please check with your distributor for availability in your country

* Por razones reglamentarias, por favor póngase en contacto con su distribuidor para conocer la disponibilidad en su país

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC83208-36	DISSECTEUR MARYLAND MIS MORS 5MM L:360MM DIA.5MM A VERROU ET CONNEXION HF	3661219317852
	MIS MARYLAND DISSECTOR 5MM JAWS L:360MM DIA.5MM WITH RATCHET AND HF CONNECTION	 3 661219 317852

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

IIb

Code GMDN :
GMDN code :

58039

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + LAITON + TITANE + POLYMERE / STAINLESS STEEL +
BRASS + TITANIUM + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X5CrNi18-10(1.4301) + X8CrNiS18-9(1.4305) + X10CrNi18-8(1.4310) +
X20Cr13(1.4021) + PPSU + TA6V(TITANE) + CuZn.Au

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

17

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).