

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC83221-44WR	PINCE FENETREE MIS ANGULEE L:440MM DIA.5MM MORS L: 23MM SANS CREMAILLERE	3661219452553
	MIS ANGULATED FENESTRATED FORCEPS L:440MM DIA.5MM L: 23MM JAWS WITHOUT RATCHET	 3 661219 452553

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

79

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*



Grasping Fenestrated Forceps / *Pinces à Préhension Fenêtrées / Pinzas de Agarre Fenestradas*

Ø 5 mm



Straight
Droite
Recta

4 mm
23 mm

DC83213-36
L : 360 mm - 14 1/8"

DC83213-44
L : 440 mm - 17 1/2"

Without Locking System
Sans Crémaillère
Sin Cremallera

DC83213-36WR
L : 360 mm - 14 1/8"

DC83213-44WR
L : 440 mm - 17 1/2"

NEW NOUVEAU NUEVO



Curved Shaft
Tube Courbe
Tubo curvado

4 mm
23 mm

DC83221-44
L : 440 mm - 17 1/2"

Without Locking System
Sans Crémaillère
Sin Cremallera

DC83221-44WR
L : 440 mm - 17 1/2"

NEW NOUVEAU NUEVO

Progressive Locking System
Crémaillère Progressive
Cremallera Progressiva

Titanium

1/2

Registered Design
Modèle déposé
Diseño registrado

To be Used with
Flexible Trocar DC82965-70
À Utiliser avec un
Trocart Flexible DC82965-70
Usar con un
Trocar Flexible DC82965-70

Clamps
Clampes
Pinzas

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC83221-44WR	PINCE FENETREE MIS ANGULEE L:440MM DIA.5MM MORS L: 23MM SANS CREMAILLE	3661219452553
	MIS ANGULATED FENESTRATED FORCEPS L:440MM DIA.5MM L: 23MM JAWS WITHOUT RATCHET	 3 661219 452553

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

35080

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TITANE / STAINLESS STEEL + TITANIUM

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + X2CrNi19-11(1.4306) + TA6V(TITANE)

Dimensions :

Voir désignations produits

MIS 2021

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

79

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).