

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
F105911	PINCE A PARAMETRE ROGERS L:220MM LEGEREMENT COURBE	3661219066699
	ROGERS PARAMETER FORCEPS LIGHTLY CURVED L:220MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-018

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION


LANDANGER

Pinces utérines - Uterines forceps - Pinzas uterinas

ROGERS			
Droite Straight Recta	1/2 Courbe 1/2 Curved 1/2 Curva	Courbe Curved Curva	Coudée Angular Angulada
22,5 cm - 8 3/4"	22 cm - 8 1/2"	21,5 cm - 8 1/2"	20,5 cm - 8"
F105910	F105911	F105912	F105913
25 cm - 10"	24,5 cm - 9 2/3"	24 cm - 9 1/2"	23 cm - 9"
F105920	F105921	F105922	F105923




F105921
24,5 cm - 9 2/3"

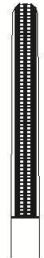

F105920
25 cm - 10"



F105921
24,5 cm - 9 2/3"

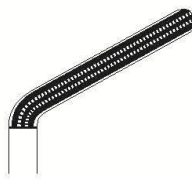

F105923
23 cm - 9"



F105922
24 cm - 9 1/2"

Mors atraumatique
Atraumatic jaws
Bocas atraumáticas

VIII - Voies basses
VIII - Gyné/Uro/Procto
VIII - Gyné/Uro/Procto

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

VIII - 18



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F105911	PINCE A PARAMETRE ROGERS L:220MM LEGEREMENT COURBE	3661219066699
	ROGERS PARAMETER FORCEPS LIGHTLY CURVED L:220MM	 3 661219 066699

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-018

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*