

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
F17035	SPECULUM COLLIN MODELE LOURD 35X100MM	3661219067566
	COLLIN SPECULUM HEAVY MODEL 35X100MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

08-031

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Spéculums vaginaux - Vaginal speculas - Espécúlos vaginales

COLLIN

F16000	90 x 14 mm
 F16010	90 x 16 mm
F16020	90 x 25 mm
F16030	90 x 30 mm
F16034	95 x 35 mm
F16038	105 x 30 mm
F16040	105 x 35 mm
F16050	105 x 38 mm
F16060	110 x 42 mm

Modèle lourd
Heavy model
Fuerte modelo

F17016	100 x 16 mm
F17025	100 x 25 mm
F17030	100 x 30 mm
F17035	100 x 35 mm
F17040	100 x 40 mm

Longues valves
Long blades
Valvulas largas

F17130	150 x 30 mm
F17135	150 x 35 mm
F17140	150 x 40 mm

Modèles avec tube d'aspiration
Models with aspiration tube
Modelos con tubo de aspiración

 F18125	90 x 25 mm
F18130	90 x 30 mm
F18135	95 x 35 mm
F18230	105 x 30 mm
F18235	105 x 35 mm
F18240	110 x 40 mm



F16010 F18125

PALMER

F17165	65 x 35 mm
--------	------------

VIII - 31

VIII - Vaginales
VIII - Gynälogia
VIII - Gynélogia

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

4/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F17035	SPECULUM COLLIN MODELE LOURD 35X100MM	3661219067566
	COLLIN SPECULUM HEAVY MODEL 35X100MM	 3 661219 067566

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

35352

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*